



OSŁONKA NA PIERSI MEDELA UNIWERSALNY 2 SZT 3087

Nr katalogowy: 008.0228

Kod EAN: 7612367003087

Producent: Madela AG

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

34,00 PLN

Opis produktu

Osłonki na piersi Medela uniwersalny 2 szt

Jeśli Twoje brodawki są wklęsłe lub płaskie, osłony formujące Medela przygotowują je do karmienia i ułatwią dziecku chwytanie piersi.

- Delikatny ucisk zmienia kształt płaskich lub wklęsłych brodawek, przygotowując je do karmienia piersią
- Elastyczna membrana jest przyjemna dla skóry
- Kształt osłony jest wygodny i dobrze dopasowuje się do piersi
- Dzięki niskiemu profilowi osłony nie odznaczają się pod ubraniem
- Jeden rozmiar pasuje do kształtów wszystkich mam
- Bez BPA

Karmienie piersią przy wklęsłych lub płaskich brodawkach

Jeżeli Twoje brodawki są wklęsłe lub płaskie, karmienie piersią może być nieco utrudnione – ale z pewnością nadal możliwe! Niektóre niemowlęta mogą mieć problemy z chwytaniem płaskich brodawek, co często wywołuje ich bolesność. Ponadto wklęsłe lub płaskie brodawki często nie dosięgają do podniebienia dziecka, przez co nie następuje odruch ssania. Pamiętaj jednak, że wiele kobiet z podobnym kształtem brodawek nie napotyka żadnych problemów z karmieniem piersią. Być może zaobserwujesz, że na skutek zmian zachodzących w piersiach podczas ciąży Twoje brodawki samoczynnie staną się bardziej wypukłe. Jeżeli tak się nie stanie, możesz wypróbować osłony formujące piersi..

Jak działają osłony formujące Medela?

Nakładki formujące piersi poddają otoczkę (obszar ciemniejszej skóry wokół brodawki) działaniu delikatnego ciśnienia w

celu stopniowego wyciągnięcia płaskiej lub wklęsłej brodawki.

Kiedy mogę rozpocząć stosowanie osłon formujących?

Osłony formujące brodawki sutkowe możesz stosować już w czasie ciąży, począwszy od około 32. tygodnia. Jeżeli jednak występuje u Ciebie schorzenie zwane niewydolnością szyjki macicy lub ryzyko przedwczesnego porodu, zapytaj specjalistę o odpowiedni moment zastosowania osłon formujących piersi, ponieważ stymulacja brodawek może wywołać skurcze. Na początku zakładaj osłony na godzinę dziennie, a następnie stopniowo wydłużaj ten czas aż do ośmiu godzin na dzień. W razie konieczności możesz nadal stosować osłony po narodzinach dziecka – zakładaj je pomiędzy sesjami karmienia, od 30 do 60 minut przed karmieniem. Unikaj jednak zakładania ich na noc, ponieważ może to spowodować bolesność brodawek

Karton może mieć drobne lub większe niedoskonałości Produkt kompletny i zgodny z opisem - Towar nowy opakowanie lekko sfatygowane przez co niższa cena - dziękujemy za wyrozumiałość!